

## Vorbereiding van systeem & patiënt

## Fecaal Management Systeem




- Naast de set van het hulpmiddel zijn handschoenen en glijmiddel vereist.
- Verwijder de lucht die zich in de ballon bevindt door de bijgeleverde spuit op de witte opblaaspoort met het opschrift '≤45ml' te zetten en de zuiger naar achteren te trekken.

- Verwijder de spuit en vul deze met slechts 45 ml water. Zet de spuit vervolgens weer op de witte opblaaspoort.

- Bevestig het opvangzakje zorgvuldig aan het uiteinde van de katheter. Het kleine haakje aan de katheter is ontworpen om het opvangzakje stevig op het aansluitpunt te bevestigen.
- Gebruik de bijgeleverde etiketten om de datum en het tijdstip van inbrengen te noteren. Plaats ze op de daarvoor bestemde plek aan het einde van de ophanglus.

- Vraag de patiënt op de linkerzijde te gaan liggen. Als deze positie niet draaglijk is voor de patiënt, zorg dan dat er een houding wordt aangenomen waarbij het rectum toegankelijk is.
- Voer een rectaal toucher uit om te kijken of het hulpmiddel kan worden ingebracht.
- Het rectum dient voldoende anale tonus te hebben en vrij te zijn van vaste ontlasting of een permanent of anaal hulpmiddel voordat het systeem wordt ingebracht.

## Inbrengen van het systeem

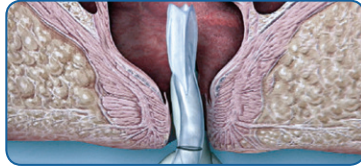


- Rol de katheterslang helemaal uit en leg deze plat op het bed. Positioneer het opvangzakje hierbij in de richting van het voeteneind.
- Steek een met glijmiddel ingesmeerde gehandschoende vinger in het blauwe vingerkapje om het systeem tijdens het inbrengen te begeleiden (het vingerkapje bevindt zich boven de markeringslijn).
- Breng glijmiddel aan op het uiteinde van de katheter waar de ballon zich bevindt.

- Pak de katheter vast en breng het uiteinde met de ballon voorzichtig in via de anale sluitspier totdat de ballon aan de buitenkant niet meer zichtbaar is en zich volledig in het rectum bevindt.
- De vinger mag hierna direct worden teruggetrokken of pas wanneer de ballon in het rectum wordt opgeblazen.

- Vul de ballon met maximaal 45ml water door de zuiger van de spuit langzaam naar voren te duwen.
- Vul de ballon nooit met meer dan 45 ml water.

- Als de vinger is teruggetrokken, geeft de groene indicator aan wanneer de ballon optimaal is gevuld voor de anatomie van de patiënt. Stop met vullen wanneer de groene indicator aangeeft dat de optimale inhoud is bereikt. De ballon mag onder geen beding met meer dan 45 ml water worden gevuld.

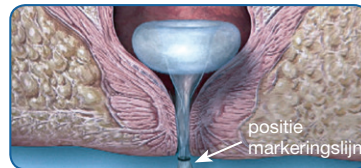


- Als de indicator al bij minder dan 30 ml water aangeeft dat het maximum is bereikt, trek de vloeistof dan terug en positioneer de ballon opnieuw in het rectum.
- Vul de ballon zoals hierboven is beschreven nadat deze opnieuw is gepositioneerd. Vul de ballon NOOIT met meer dan 45 ml water.
- De rode indicator geeft het aan als de ballon met meer dan 45 ml water wordt gevuld. Als de rode indicator volledig omhoog is gekomen, beoordeel dan de positie van de patiënt, laat de ballon volledig leeglopen en herhaal het vulproces. Stop met opblazen wanneer de groene indicator aangeeft dat de optimale inhoud is bereikt.

- Maak de spuit los van de opblaaspoort en trek voorzichtig aan de katheterslang om te controleren of de ballon stevig in het rectum zit en tegen de bodem van het rectum aan ligt.
- Registreer waar de markeringslijn zich bevindt ten opzichte van de anus van de patiënt.
- Observeer regelmatig of de positie van de markeringslijn is veranderd om te bepalen of de retentieballon in het rectum van de patiënt is verschoven. Dit kan erop wijzen dat de ballon of het systeem opnieuw moet worden gepositioneerd.

- Wanneer het systeem naar buiten wordt geduwd, laat dan de ballon volledig leeglopen; spoel het uiteinde van de katheter met de ballon schoon en breng het systeem volgens de instructies onder 'Inbrengen van het systeem' opnieuw in.
- Voordat het systeem opnieuw wordt ingebracht, dient een rectaal toucher te worden uitgevoerd om te controleren of er geen ontlasting aanwezig is.
- Indien het systeem meer dan drie keer naar buiten wordt geduwd, dient te worden overwogen het gebruik ervan te staken.

- Leg de katheterslang langs het been van de patiënt en zorg dat er geen sprake is van knikken en blokkades.

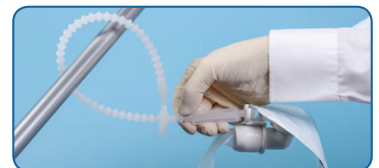

- Hang het opvangzakje aan de ophanglus naast het bed zodat dit zich lager dan de patiënt bevindt.

## Spoelen, onderhoud en verwijdering van het systeem



- Vul de spuit met water op kamertemperatuur, zet de spuit op de blauwe irrigatie-/ medicatiepoort (met markering 'IRRIG./Rx') en druk de zuiger langzaam in om het hulpmiddel te spoelen.
- Zorgprofessionals dienen er speciaal op te letten dat ze voor spoelen alleen de blauwe irrigatie-/medicatiepoort gebruiken.
- Gebruik IN GEEN GEVAL de witte opblaaspoort met het opschrift '≤45ml' om te spoelen, aangezien dit de retentieballon te ver kan opblazen en het systeem niet zoals bedoeld kan worden gespoeld.
- Indien herhaaldelijk spoelen met water niet helpt om de ontlasting weer vrij door de katheter te laten lopen, dient het systeem te worden gecontroleerd om een externe obstructie (bijv. druk van een lichaamsdeel of een onderdeel van het systeem) uit te sluiten. Ook kan het zijn dat er niet langer sprake is van diarree.
- Als er geen bron van obstructie wordt gevonden, dient het gebruik van het systeem te worden gestaakt.
- Verwissel het opvangzakje wanneer dat nodig is.
- Gooi gebruikte zakjes weg in overeenstemming met het in de instelling geldende protocol voor het verwijderen van medisch afval.
- Controleer het systeem regelmatig op verstoppingen als gevolg van knikken in de slang, vaste stukjes ontlasting of externe druk.
- Om de katheter uit het rectum te kunnen verwijderen, moet men de retentieballon eerst laten leeglopen.
- Zet de spuit op de witte opblaaspoort met het opschrift '≤45ml' en trek langzaam al het vocht uit de retentieballon.
- Maak de spuit los en gooi deze weg.
- Pak de katheter zo dicht mogelijk tegen het lichaam van de patiënt vast en verwijder deze langzaam uit de anus.
- Gooi het hulpmiddel weg in overeenstemming met het voor de instelling geldende protocol voor het verwijderen van medisch afval.

## Toediening van medicatie



- Bevestig de bijgeleverde spuit en spoel 10 ml water door de spoelslang.
- Vul een nieuwe spuit met de voorgeschreven medicatie.
- Plaats de sluitclip losjes op de katheter op de zwarte markeringslijn. Zet de spuit op de blauwe irrigatie-/medicatiepoort (met markering 'IRRIG./Rx') en dien de medicatie toe.
- Zorgprofessionals dienen er speciaal op te letten dat ze voor het toedienen van medicatie alleen de blauwe irrigatie-/medicatiepoort gebruiken.
- Gebruik IN GEEN GEVAL de witte opblaaspoort met het opschrift '≤45ml' om medicatie toe te dienen, aangezien dit de retentieballon te ver kan opblazen en de medicatie niet zoals bedoeld aan de patiënt kan worden toegediend.
- Spoel onmiddellijk ten minste 50 ml water door de spoelslang om er zeker van te zijn dat de medicatie het rectum bereikt.
- Zet de sluitclip vast op de katheter om ervoor te zorgen dat hier niets doorheen kan stromen (zorg dat u de tweede sluitstand gebruikt; knijp stevig met de wijsvinger en duim en beide handen om voor een goede afsluiting te zorgen).
- Laat de medicatie in het rectum voor zo lang de behandelend arts heeft voorgeschreven.
- Verwijder de sluitclip.
- Bevestig een nieuwe spuit (niet meegeleverd) en spoel 10 ml water door de spoelslang.
- Gooi de spuit weg in overeenstemming met het beleid van de betreffende instelling.
- Open het donkerblauwe kapje van het monsterafnamepunt om een monster af te nemen uit de katheter.
- Duw het uiteinde van een Luer-Slip-spuit (ook wel katheteruiteinde of 'Toomey'-spuit genoemd) door de gleuf in het monsterafnamepunt om het binnenste van de katheter te bereiken.
- Trek de zuiger van de spuit naar achteren om het monster af te nemen.
- Trek de spuit terug en sluit het donkerblauwe kapje van het monsterafnamepunt.

## Bestelinformatie

Flexi-Seal™ PROTECT FMS-set (1 set per verpakking, 1 zak)	421630
Privacy™-opvangzak met APS-filter (10 per verpakking)	411108

Lees voor gebruik Flexi Seal™ Protect de bijsluiter in de verpakking.

Voor meer informatie, of wanneer u vragen heeft:  
Telefoon: **0348-436900** of kijk op [www.convatec.nl](http://www.convatec.nl)