

Recomendaciones de los expertos para el manejo de la incontinencia fecal aguda con diarrea (IFAd) en la unidad de cuidados intensivos


C Bayón García, R Binks, E De Luca, C Dierkes, A Franci, E Gallart, G Niederalt, D Wyncoll, P Vaes, B Soderquist, S Gibot. J Intensive Care Soc. 2013;14(Supl 2):1-9.

Algoritmo para la evaluación y gestión de riesgos IFAD ^{1‡}



IFAd: incontinencia fecal aguda con diarrea; **C. difficile:** Clostridium difficile; **E. coli:** Escherichia coli; **MRSARM:** Staphylococcus aureus resistente a la meticilina; **ESBL:** betalactamasa de espectro ampliado; **CRE:** enterobacteriaceae resistente al carbapenem; **FMS:** sistema de control fecal; instrucciones de uso.


La incontinencia fecal aguda con diarrea se asocia con importantes problemas en la UCI: ^{1,2}

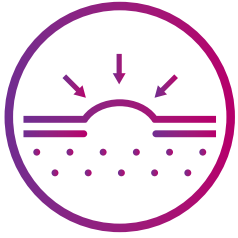

Lesión cutánea y úlceras de decúbito



Aumento de las estancias hospitalarias y los costes

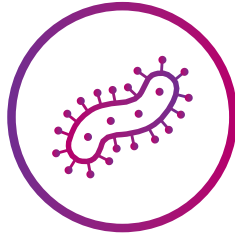

Contaminación cruzada con infecciones intrahospitalarias

Los expertos recomiendan implementar un protocolo estandarizado para el tratamiento de la IFAd con el fin de evitar complicaciones asociadas¹

www.flexi-seal.convatec.com

Flexi-Seal™ PROTECT PLUS FMS		
Kit Flexi-Seal™ Protect Plus FMS LUER	422303	1 kit/caja, 1 bolsa
Kit Flexi-Seal™ Protect Plus FMS ENFit™	421703	1 kit/caja, 1 bolsa
Bolsa colectora Flexi-Seal™ Protect Plus Privacy™ con filtro APS (10/caja)	422291	5 bolsas/caja
Flexi-Seal™ PROTECT FMS		
Flexi-Seal™ PROTECT FMS	421630	1 kit/caja, 1 bolsa
Bolsa colectora Flexi-Seal™ Privacy™ con filtro APS	411108	10 bolsas/caja
Flexi-Seal™ Signal™ FMS		
Flexi-Seal™ Signal™ FMS	418000	1 kit/caja, 3 bolsas
Bolsa colectora Flexi-Seal™ Privacy™ con filtro APS	411108	10 bolsas/caja
Colector fecal Flexi-Seal™		
Colector fecal Flexi-Seal™ con adhesivo hidrocoloide*	650078	10 colectores por caja

* Cuando los sistemas de control fecal Flexi-Seal™ no son una opción

Referencias

1. Bayón García C, Wyncoll D, De Luca E, Dierkes C, Franci A, Gallart E, Niederalt G, Binks R P Vaes, B Soderquist, S Gibot. Recomendaciones de expertos para el tratamiento de la incontinencia fecal aguda con diarrea en la unidad de cuidados intensivos. J Intensive Care Soc. 2013;14 (Supl 2):1-9.
2. Bayón García C, Binks R, De Luca E, Dierkes C, Franci A, Gallart E, Niederalt G, Wyncoll D. Prevalencia, gestión y desafíos clínicos relacionados con la incontinencia fecal aguda en la UCI y entornos de cuidados intensivos: la PRIMERA encuesta descriptiva transversal. Intensive Crit Care Nurs. 2012;28(4):242-50.

[†] Reproducido con permiso de Stansted News Ltd de 'Bayón García C, Binks R, De Luca E et al. Recomendaciones de expertos para el tratamiento de la incontinencia fecal aguda con diarrea en la unidad de cuidados intensivos. JICS 2013;14:Suplemento 2, página 6.

™ Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Convatec patrocina la iniciativa FIRST™ como parte de su compromiso para comprender mejor y abordar los desafíos clave en el tratamiento de la incontinencia fecal aguda en el entorno de cuidados intensivos.

© 2023 ConvaTec Inc. AP-54500-GBL-SPAEU-V1

